

Sistema de apertura pelable




Separe las dos láminas sujetando la bolsa por un extremo.




Extraiga Fleboflex® de la bolsa protectora con cuidado.

Seguridad en la adición de medicamentos

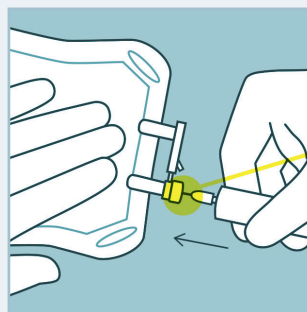


Colocar la bolsa sobre una superficie limpia, sujetar de forma segura e introducir la aguja por el centro del punto de adición.

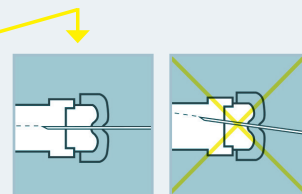


Introducir la aguja perpendicularmente al punto de adición.


Conexión segura con el equipo de administración

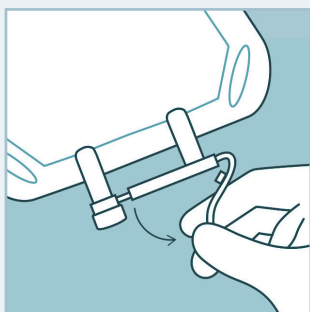

Separar la lengüeta protectora del puerto de infusión, dejando al descubierto la membrana de acceso a la bolsa.

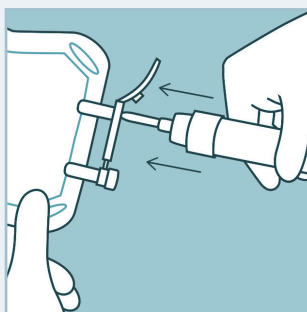

Sujetar la bolsa de forma segura e insertar el extremo del equipo de administración. Al avanzar a través del tubo, aparecerá una leve resistencia de forma gradual.


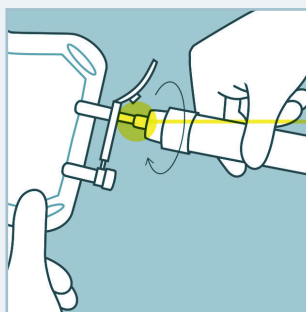


Para garantizar la correcta conexión y evitar posibles fugas, empuje el equipo mediante un movimiento giratorio hasta el primer escalón del punzón.

Fleboflex®: sistema cerrado y totalmente colapsable

El contenedor Fleboflex® está diseñado para funcionar sin ventilación. Fleboflex® no requiere aire para retirar la solución.

Si se utiliza un equipo de infusión con toma de aire abierta, la infusión podría ralentizarse o incluso detenerse si se producen burbujas de aire a través del sistema de administración.

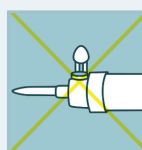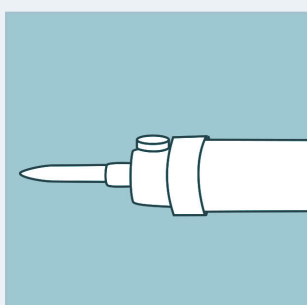

Filtro de aire abierto.

Filtro de aire cerrado. Utilizar siempre equipos de infusión sin toma de aire. Si se utilizan equipos de infusión con toma de aire, esta deberá mantenerse cerrada durante toda la infusión para garantizar un correcto funcionamiento de Fleboflex®. Si se detiene la infusión, cierre la entrada de ventilación de aire, sacuda el recipiente y reanude la infusión.

Este material está destinado exclusivamente a profesionales de la salud y se pone a su disposición desde un sitio web global o una aplicación digital. Tenga en cuenta que el registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para más información sobre la disponibilidad de los productos, diríjase a su representante local de Grifols o póngase en contacto a través de www.grifols.com.