




Adición de medicamentos y extracción de solución mediante jeringa

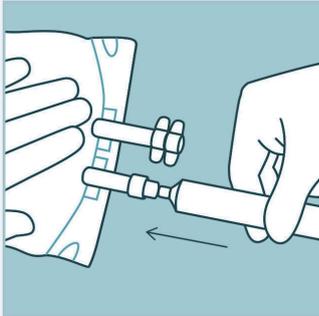

Conectar una jeringa a la válvula Luer.

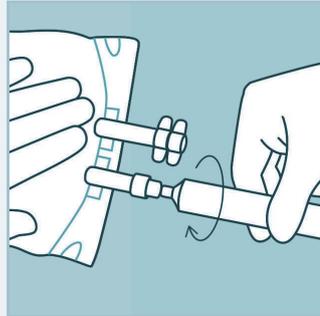


Fijar la conexión mediante un pequeño movimiento de rotación.

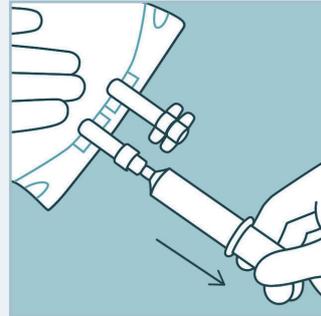


Adicionar o extraer solución.

Reconstitución de viales con adaptador vial

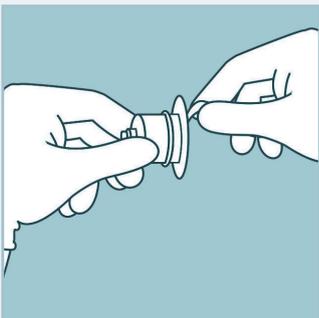


Retirar la lámina protectora del blíster que contiene el adaptador de vial macho. No retirar el adaptador del blíster.

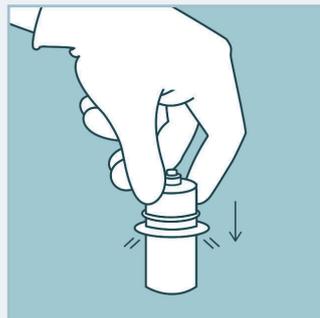

Sin retirar el blíster, conectar el adaptador de vial en el vial presionando verticalmente sobre la superficie hasta que el adaptador quede fijado y el punzón haya penetrado la superficie del vial.



Retirar el blíster.

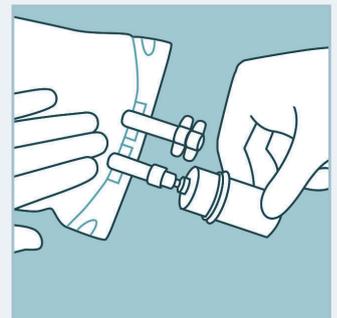

El vial con el adaptador de vial está listo para reconstituirse una vez se conecte a la válvula Luer de la bolsa.

Este material está destinado exclusivamente a profesionales de la salud y se pone a su disposición desde un sitio web global o una aplicación digital. Tenga en cuenta que el registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para más información sobre la disponibilidad de los productos, diríjase a su representante local de Grifols o póngase en contacto a través de www.grifols.com.