

# Fluidoterapia

## Fleboflex®

Nuestro envase por excelencia

### Estudios de compatibilidad fármaco-envase

	Fleboflex®	
	5 °C	25 °C
<b>Cefotaxima</b> / 0,5 mg/ml en SF	10 días	1 día
<b>Cefuroxima</b> / 0,5 mg/ml en SF	10 días	1 día
<b>Ciclofosfamida</b> / 2 mg/ml en SF	6 días	5 días
<b>Diazepam</b> / 50 µg/ml en SF	10 días	4 días
<b>Docetaxel</b> / 0,3 mg/ml en SF	7 días	7 días
<b>Doxorubicina</b> / 0,1 mg/ml en SF	30 días	15 días
<b>Etopósido</b> / 0,3 mg/ml en SF	-	10 días
<b>5-Fluorouracilo</b> / 3 mg/ml en SF	28 días	28 días
<b>Isosorbida Dinitrato</b> / 0,1 mg/ml en SF	10 días	10 días
<b>Metilprednisolona</b> / 5 mg/ml en SF	10 días	2 días Prednisolona libre > 6,6 %
<b>Morfina</b> / 0,1 mg/ml en SF	10 días	10 días
<b>Nitroglicerina</b> / 50 µg/ml en SF	10 días	10 días
<b>Ondansetron</b> / 80 µg/ml en SF	10 días	10 días
<b>Paclitaxel</b> / 0,3 mg/ml en SF	7 días	7 días
<b>Propofol</b> / 2 mg/ml en GD 5%	10 días	10 días

GRIFOLS

# Fluidoterapia

## Fleboflex Luer®

Mejora la seguridad en la preparación de mezclas en la farmacia hospitalaria

### Estudios de compatibilidad fármaco-envase

	Fleboflex Luer® 25 °C
<b>Carboplatino</b> / 0,5 mg/ml en SF	7 días
<b>Cisplatino</b> / 0,5 mg/ml en SF	7 días
<b>Citarabina</b> / 13 mg/ml en SF	7 días
<b>Dacarbazina</b> / 3,4 mg/ml en SF	1 día*
<b>Docetaxel</b> / 0,3 mg/ml en SF	7 días
<b>Etopósido</b> / 0,3 mg/ml en SF	7 días
<b>Epirubicina</b> / 2 mg/ml en SF	7 días
<b>Gemcitabina</b> / 4 mg/ml en SF	7 días
<b>Ifosfamida</b> / 1 mg/ml en SF	7 días
<b>Metotrexato</b> / 1 mg/ml en SF	7 días
<b>Mitoxantrona</b> / 0,2 mg/ml en SF	7 días
<b>Oxaliplatino</b> / 0,6 mg/ml en GD 5%	7 días
<b>Paclitaxel</b> / 0,3 mg/ml en SF	7 días
<b>Vinblastina</b> / 0,2 mg/ml en SF	7 días
<b>Vincristina</b> / 0,04 mg/ml en SF	7 días
<b>Vinorelbina</b> / 1 mg/ml en SF	7 días

\* Las soluciones recién preparadas (reconstituidas) y adicionalmente diluidas de Dacarbazina medac se deben proteger de la luz y se deben utilizar de inmediato.<sup>1</sup>

1. Ficha Técnica España Dacarbazina medac 2017.

Este material está destinado exclusivamente a profesionales de la salud y se pone a su disposición desde un sitio web global o una aplicación digital. Tenga en cuenta que el registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para más información sobre la disponibilidad de los productos, diríjase a su representante local de Grifols o póngase en contacto a través de [www.grifols.com](http://www.grifols.com).

**GRIFOLS**

Fabricado por:  
**Laboratorios Grifols, S.A.**  
Can Guasch, 2 - Parets del Vallès,  
08150 Barcelona - España  
Tel. +34 93 571 01 00  
[www.grifols.com](http://www.grifols.com)

Distribuido por:  
**Grifols Movaco, S.A.**  
C/ Palou, 6 - Parets del Vallès,  
08150 Barcelona - España  
Tel. +34 93 571 02 00  
Fax. +34 93 571 02 94